

Anleitung

1. Waschen Sie sich vor dem An- & Abziehen die Hände.
 2. Falten Sie die Maske auf und schieben Sie den Filter in die innere Schicht auf der Rückseite der Maske.
 3. Setzen Sie die Maske auf. Die Maske kann auch ohne Filter verwendet werden.
-

Waschanleitung

Die Maske ist waschbar, die Filter sind nicht waschbar und sollten am besten täglich oder wenn der Filter nass ist, gewechselt werden.

1. Entfernen Sie den Filter, bevor Sie die Maske waschen.
2. Waschen Sie die Maske bis zu 60° in der Waschmaschine.
3. Trocknen Sie die Maske an der Luft, um die Form zu erhalten.



Filterstandard: GB2626 entspricht Filterfunktion von FFP2



Manroof GmbH · Mattengasse 7 · 8005 Zürich
044 274 15 00 · info@manroof.ch · manroof.ch



Maske mit Wechselfilter



Setzen Sie den Filter in die Rückseite der Maske ein



Ziehen Sie die Ohrenschlaufen über die Ohren